


# \*nosiboo<sup>®</sup>pro

electric nasal aspirator

## KORISNIČ KIPRIRUČNIK

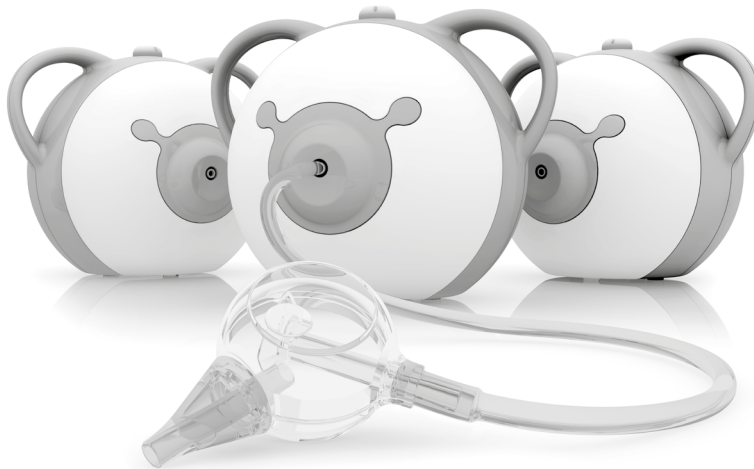

reddot award 2014  
winner





KIDS  
DESIGN  
AWARD



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2016



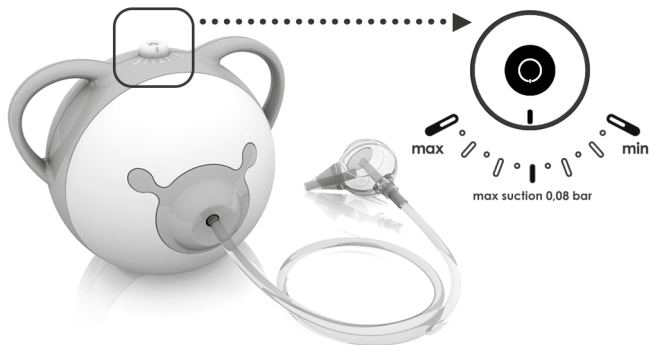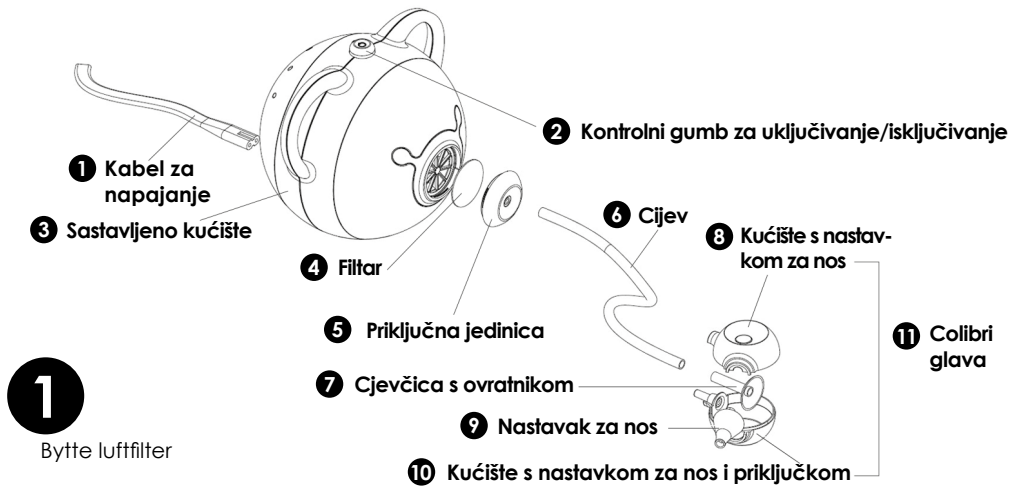

ispravno postavljanje Colibri glave


3



Preporučeno trajanje usisavanja je 10 sekundi po nosnici.

4

čišćenje Colibri glave

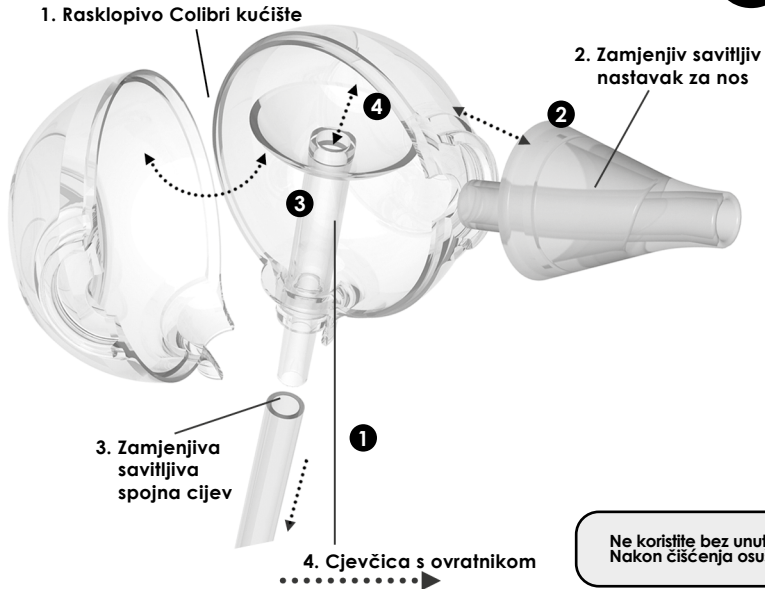

Ne koristite bez unutarnje cjevčice s ovratnikom!  
Nakon čišćenja osušite svaki dio Colibri glave.

# KORISNIČ KIPRIRUČNIK

## Nosni aspirator Nosiboo Pro

### Sadržaj

Sadržaj paketa	4
Uvodna riječ	4
Znakovi upozorenja i sigurnosti	4
Važne sigurnosne upute	5
1. Predviđena namjena	6
2. Upoznavanje proizvoda	7
3. Prvo korištenje	7
4. Upute za uporabu	7
5. Otklanjanje nepravilnosti u radu	9
6. Održavanje i čuvanje	12
7. Čišćenje	12
8. Važne informacije o smanjenju elektromagnetskih smetnji	13
9. Okoliš	13
10. Specifikacije	13
11. Dodaci, rezervni dijelovi	13

**NOSIBOO PRO JE HIGIJENSKI  
MEDICINSKI UREĐAJ**

**Možete koristiti svoje pravo  
na odustajanje samo ako  
je uređaj neoštećen i ako je  
zaštitna folija na Colibri glavi  
neoštećena.**

**Smjernice i primjenjivi propisi:** Direktiva 2011/83/EU § 16 (e) Europskog parlamenta i Komisije, Republika Austrija: FAGG: § 18 (1) 5, Mađarska: 45/2014. (II. 26.) Vlada uredba § 29 (1) (e).  
Registrijte svoj uređaj pošal čemo vam poklon kupon kojim ostvarujete pravo na kupnju s popustom. Kupon možete iskoristiti u online trgovini Nosiboo proizvođača. [www.nosiboo.eu/product\\_registration](http://www.nosiboo.eu/product_registration)

### Sadržaj paketa

\* Colibri glava \* Kabel za napajanje \* Korisnički priručnik \* Uređaj \* Cijev \* Rezervni zamjenjivi nastavak za nos \* Quick Guide

### Uvodna riječ

Dragi korisniče,

Čestitamo vam na kupnju našeg aspiratora za nos Nosiboo Pro koji je osvojio nagrade KSCI, PTPA, Red Dot Design i German Design!  
Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik kako bi mogli godinama koristiti nosni aspirator i dugoročno sprječavati bolesti.



**Molimo vas da prije korištenja uređaja  
pažljivo pročitate korisnički priručnik!**

**Attract Kft. je ISO 13485 certificirani proizvođač medicinskih  
uređaja. Ovaj proizvod pripada pod MDD pravnu skupinu  
proizvoda (MDD Legacy Device).**

**Actor EUDAMED No.: HU-MF-000004252**

### Znakovi upozorenja i sigurnosti

Možete vidjeti sljedeće znakove u korisničkom priručniku ili na naljepnici uređaja:



**PROIZVEO: ATTRACT KFT.**  
7622 Pécs, Siklósi út 1/1 – Mađarska

T +36 72 551 642 [customerservice@nosiboo.com](mailto:customerservice@nosiboo.com)  
[www.nosiboo.eu](http://www.nosiboo.eu)

DMR-07/A05/6/V08 \* 01. 04. 2022 \* Stranica: 4/16

## Objašnjenje



Sigurnosna klasifikacija primijenjenih dijelova: tip BF (pojačana zaštita od strujnog udara)



\* Referenca (broj narudžbe)



\* Upozorenje!



\* Uređaj klase II (dvostruka izolacija)



\* Serijski broj



\* Opasni otpad



\* Class IIa medical device



\* GTIN – Oznaka proizvoda u međunarodnoj trgovini (UDI-DI)



\* Ime i adresa proizvođača



\* LOT broj (ID broj proizvodnje)



\* Pročitajte korisnički priručnik



\* Zaštićen od krutih predmeta većih od 12,5 mm i okomito padajućih kapljica vode.



\* Samo za kućnu uporabu



\* Čuvajte suhim!

HRV

## Važne sigurnosne upute



### Upozorenje:

**Ako se ne izbjegniju moguće opasne situacije u nastavku, može doći do ozljede korisnika ili čak do nesreće sa smrtnim ishodom.**

### Sigurnosne upute za opću uporabu

- \* Uređaj treba koristiti isključivo za uklanjanje sluzi iz dječjeg nosa. Ne smije se koristiti u druge svrhe!
- \* ZABRANJENO je koristiti uređaj u kupaonici ili bilo kojem drugom vlažnom ili mokrom okruženju.
- \* Prestanite koristiti uređaj ako je u kućište ušla tekućina ili kruta tvar. Kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar.
- \* Uređaj smijete koristiti samo odrasle osobe.
- \* Tijekom korištenja uređaj mora biti u stabilnom položaju, tako da stoji na ravnoj površini.
- \* Ne polazite djeteta na leđa i ne blokirajte slobodan prolaz kroz nos dok koristite uređaj!
- \* Ne ostavljajte uređaj bez nadzora u blizini djece ili osoba sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima!
- \* Ne ostavljajte uređaj bez nadzora u blizini većih kućnih ljubimaca (pasa, mačaka) koji ga mogu prevrnuti!
- \* Kabel za napajanje se može lako omotati oko dječjeg vrata!
- \* Uređaj se ne smije koristiti u okruženjima bogatim kisikom (u bolničkim uvjetima)!
- \* Kako bi se spriječilo prekomjerno korištenje i zbog sigurnosti vašeg djeteta, uređaj se automatski isključuje nakon 15 minuta. Nakon prisilnog isključivanja, uređaj se može ponovno uključiti. U slučaju pregrijavanja, elektronika će onemogućiti ponovno korištenje na oko 50 minuta. Za više informacija molimo pročitajte poglavlje 4 korisničkog priručnika.
- \* Prije korištenja uređaja provjerite jesu li svi dijelovi spojeni na odgovarajući način!
- \* Prije korištenja, dvaput provjerite jeste li umetnuli (suhu) cjevčicu s ovratnikom u Colibri glavu nakon čišćenja.
- \* Ne koristite Colibri glavu i uređaj bez cjevčice s ovratnikom.
- \* Ne koristite uređaj bez filtra za zrak.
- \* Ne koristite više od 5 ml fiziološke otopine, jer ako otopina dospije u cijev, može uzrokovati oštećenje uređaja.
- \* Kada koristite uređaj, mjesto spajanja Colibri glave i spojne cijevi treba usmjeriti prema dolje.
- \* Prestanite koristiti uređaj ako u cijev uđe sluz ili fiziološka otopina, isključite ga iz struje, zatim ispraznite Colibri glavu, očistite i osušite Colibri glavu i cijev, provjerite filter za zrak i zamijenite ga ako je mokar ili začepljen.
- \* Provjerite jesu li kućište, cijev i Colibri glava oštećeni ili napuknuti. Ne koristite uređaj ako primijetite da je oštećen! Zamijenite oštećeni dio! (Popis rezervnih dijelova nalazi se u odjeljku "Dodaci, rezervni dijelovi".)
- \* Ako se nakon korištenja uređaja na nosu djeteta pojavi osip ili crvenilo, ne koristite ponovno uređaj! Posavjetujte se s liječnikom.
- \* Uređaj koristite samo s cijevi i Colibri glavom koje je isporučio proizvođač.
- \* Ne spajajte Colibri glavu na druge uređaje.

### *Sigurnosne upute za priključivanje uređaja na električnu mrežu*

- \* Zaštitite kabel za napajanje od oštećenja! Nemojte ga slomiti, i ne stavljajte teške predmete na njega jer bi oštećeni kabel mogao uzrokovati strujni udar.
- \* Držite kabel za napajanje dalje od izvora topline (npr. peći, grijača ili konvektora) jer može oštetiti izolaciju.
- \* Koristite uređaj samo ako su cijevi i Colibri glava suhi.
- \* Ne uklanjajte vijke za pričvršćenje iz kućišta. Ne prepravljajte uređaj za druge svrhe.
- \* Zabranjeno je korištenje uređaja ako na kućištu ili kabelu za napajanje dođe do loma ili se pojavi pukotina zbog pogrešne uporabe.
- \* U slučaju neočekivane nepravilnosti u radu ili kvara, odmah isključite uređaj i prekinite napajanje tako da ga isključite iz struje.

### *Sigurnosne upute za sljedeće korištenje uređaja*

- \* Nakon korištenja uvijek dezinficirajte Colibri glavu!
- \* Ne ostavljajte dijelove rastavljene Colibri glave na dohvata djece jer bi ih mogli progutati.

### *Opće mjere opreza*

- \* Pročitajte i slijedite upute u odjeljku "Važne informacije o smanjenju elektromagnetskih smetnji".
- \* Pročitajte i slijedite upute u odjeljku "Okoliš" ukoliko želite odložiti uređaj ili bilo koji njegov dio.

## 1. Predviđena namjena

Aspirator za nos Nosiboo Pro namijenjen je za uklanjanje sluzi iz dječjeg nosa.

Vakuu i protok zraka koji su potrebni za usisavanje stvari usisni uređaj posebno dizajniran za tu svrhu. Colibri glava, koja se umeće u nos, spojena je s ovim uređajem putem cijevi. Colibri glava ima patentirani dizajn koji sprječava ulazak sluzi u uređaj.

### *Predviđena namjena:*

- \* osigurati disanje dojenčadi kroz nos
- \* spriječiti komplikacije uslijed obične dječje prehlade, te ubrzati proces izlječenja usisavanjem sluzi iz nosa
- \* ublažiti simptome slične dječjoj alergiji uklanjanjem sluzi iz nosa

### *Pacijenti za koje je proizvod namijenjen:*

- \* djeca (obično mlađa od 6 godina) koja ne mogu sama ukloniti sluz puhanjem nosa.

### *Bolest, stanje koje zahtijeva liječenje (indikacija):*

- \* za uklanjanje začepljenja nosa
- \* za liječenje obične prehlade i kao pomoćno liječenje superinfekcije paranazalnih sinusa
- \* kao dodatno liječenje alergijskog infektivnog stanja

Stanja kod kojih se uređaj ne smije koristiti (kontraindikacija):

- \* hemofilija
- \* ako se krvne žile sluznice nosne pregrade prošire – u slučaju čestog krvarenja iz nosa
- \* kod uzimanja lijekova za razrjeđivanje krvi
- \* u slučaju kongenitalnih malformacija (npr. rascjep nepca)

Osoba koja rukuje uređajem:

- \* Dob: odrasla osoba starija od 18 godina
- \* Spol: nije primjenjivo (muškarac ili žena)
- \* Znanje: treba imati opće znanje u skladu sa svojom dobi
- \* Obrazovanje: min. osnovno obrazovanje, nije potrebno posebno znanje za korištenje uređaja.
- \* Važno: poznavanje korisničkog priručnika uključenog u paket.

## 2. Upoznavanje proizvoda

**Slika 1 – Nosni aspirator Nosiboo Pro**

HRV

## 3. Prvo korištenje

*Sastavljanje Colibri glave*

1. Očistite i osušite dijelove Colibri glave (vidi odjeljke "Čišćenje" i "Održavanje i čuvanje").
2. Umetnite cjevčicu s ovratnikom u kućište s nastavkom za nos koje je isporučeno s priključkom.
3. Stavite kućište s nastavkom za nos bez priključka u ispravan položaj.
4. Nataknite savitljivi nastavak za nos na predviđeno mjesto
5. Pričvrstite jedan kraj cijevi na Colibri glavu.

*Sastavljanje uređaja*

6. Provjerite je li filter za zrak iza priključne jedinice na svom mjestu.
7. Pričvrstite slobodni kraj cijevi na kućište uređaja.
8. Spojite jedan kraj kabela za napajanje 230 V na donji dio kućišta uređaja, a zatim drugi kraj u utičnicu.

Uređaj je spreman za korištenje.

## 4. Upute za uporabu

Prije korištenja, uređaj treba postaviti tako da se utikač kabela za napajanje može lako iskopčati iz utičnice! Možete uključiti ili isključiti uređaj pritiskom na gumb na gornjoj strani kućišta i kontrolirati intenzitet usisa okretanjem gumba. Mogućnost podešavanja jamči da nakon odabira odgovarajuće usisne snage, roditelj ne može uzrokovati nikakvu sekundarnu deformaciju u nosu. Prije uključivanja uređaja, pronađite odgovarajuću brzinu protoka zraka prilagođenu uzrastu vašeg djeteta na temelju slike 2 (Podešavanje usisne snage).

**Slika 2 - Podešavanje usisne snage**

Minimalna vrijednost raspona pogodna je za novorođenčad, srednja vrijednost za bebe i maksimalna vrijednost za malu i predškolsku djecu. Na učinkovitost uređaja značajno utječe gustoća sluzi, obim bolesti i jedinstvena anatomija djeteta. Ako je sluz rijetka, uređaj možete koristiti na nižoj postavci, a ako je gusta, možete ga koristiti na višoj postavci nego obično.

Uređajem mogu rukovati isključivo odrasle osobe. Ne dajte djetetu uređaj koji spreman za uporabu!

Tijekom korištenja uređaja držite dijete u stabilnom položaju. Neka dijete sjedne u vaše krilo i držite ga ili posjednite dijete u uspravan položaj podupirući mu leđa jastukom. Također ga možete posjesti u sjedalicu s nagnutim naslonom.



Ne polažite dijete na leđa i ne blokirajte slobodan prolaz kroz nos!  
Provjerite jesu li otvori na stražnjoj strani uređaja slobodni! Upozorenje!  
Vrući zrak može izaći iz uređaja kroz otvore! Iskopčajte uređaj nakon što se potpuno isključio i faza hlađenja završila!

Umetnite prethodno dezinficiranu i osušenu Colibri glavu u dječji nos, a zatim uključite uređaj pritiskom na kontrolni gumb (uređaj radi na postavci koju ste zadnji put koristili).

### **Slika 3 - Ispravno postavljanje Colibri glave**

Gurnite vrh Colibri glave u nos. Vrh treba biti usmjeren malo prema dolje i prema van prema očnoj jabučici. U tom položaju možete nježno pomakati Colibri glavu. Ovom metodom možete lako dosegnuti otvor koji vodi do maksimalnog sinusa i nećete ozlijediti sluznicu nosne školjke ili kapilare nosne pregrade.

U rijetkim je slučajevima moguće da su nosnice novorođenčeta premale za umetanje silikonskog vrha Colibri glave. U tom slučaju postavite silikonski vrh na način da je nosnica u potpunosti prekrivena. Učinkovitost nazalnog aspiratora dovoljna je za pravilno čišćenje nosnih prolaza.

Mjesto spajanja savitljive cijevi treba usmjeriti prema dolje dok je uređaj u uporabi.

Patentirani dizajn Colibri glave može držati do 5 ml rijetke tekućine i spriječiti ulazak sluzi u savitljivu cijev.

Suha i vrlo gusta sluz može se razrijediti fiziološkom otopinom. Ne koristite više od 5 ml otopine odjednom jer ako tekućina uđe u cijev može oštetiti uređaj!

Nakon uporabe otopine pričekajte nekoliko minuta, uklonite maramicom višak sluzi koja istječe iz nosa. Tek nakon toga možete koristiti aspirator za nos.

*Kapi za nos i drugi lijekovi koje preporučuju liječnici trebaju se koristiti nakon usisavanja sluzi!*

**Preporučeno trajanje usisavanja je 10 sekundi po nosnici.**

Ako morate prekinuti usisavanje, isključite uređaj. Kada se motor potpuno zaustavi, možete ga ponovno pokrenuti. Uređaj se isključuje nakon 15 minuta neprekidnog rada, ali se može ponovno uključiti. U slučaju prekomjerne uporabe ili ako nije osigurana dovoljna ventilacija, toplinski prekidač će isključiti uređaj i spriječiti ponovnu uporabu na oko 30 minuta iz sigurnosnih razloga.



Ne koristite nosni aspirator za ispiranje nosa!



Aspirator za nos Nosiboo Pro može se koristiti nekoliko puta dnevno. Preporučuje se da prije spavanja i hranjenja očistite djetetu dišne putove tako da može slobodno disati.

Ne uzrokuje bol djetetu; upoznajite ga s uređajem i metodom na tolerantan način.

Nakon uporabe uvijek isključite uređaj pomoću kontrolnog gumba.

Nakon što ste isključili uređaj, motor će raditi još kratko vrijeme kako bi se ohladio.

Ne isključujte uređaj iz utičnice dok se potpuno ne ugasi!

Ne pokrivajte otvore na stražnjoj strani uređaja dok je u uporabi!

Iskopčajte uređaj nakon što se potpuno isključio i faza hlađenja završila.

*Preporučeni raspon snage:*

- \* 0,04 – 0,08 bar. Koristiti niže vrijednosti raspona kod dojenčadi, a gornje vrijednosti kod 4-godišnje ili starije djece.
- \* Na usisnu snagu jako utječe gustoća sluzi i obim bolesti.

## 5. Otklanjanje nepravilnosti u radu

Ako sumnjate na neispravan rad uređaja Nosiboo Pro, molimo pročitajte sljedeća dva poglavlja. Kao prvi korak, Vodič za otklanjanje nepravilnosti u radu daje prijedloge za rješavanje konkretnih problema. Na dijagramu možete pronaći probleme i prijedloge za njihovo rješavanje. Ako ti prijedlozi nisu riješili problem, Vodič za upravljanje kvarovima pomaže vama/vašem trgovcu/isporučitelju da otkrije kvar što je prije moguće. Molimo vas da u slučaju kvara uređaja detaljno proučite ova poglavlja.

Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja kod proizvoda koji su kupljeni od neautoriziranih uvoznika ili prodavača.

Vodič za otklanjanje nepravilnosti u radu

<b>Nepravilnost u radu</b>	<b>Razlog</b>	<b>Preporuka</b>
Uređaj se ne može upaliti.	Uređaj nije uključen u struju.	Spojite kabel za napajanje na uređaj, a zatim u utičnicu od 230 V.
Uređaj se ne može upaliti.	Uređaj se isključio zbog prekomjerne uporabe iz sigurnosnih razloga.	Zbog zdravlja vašeg djeteta, prekinite koristiti aspirator za nos. Uređaj se može ponovno koristiti za oko 50 minuta.
Snaga usisa je smanjena.	Colibri glava je začepljena ili je pogrešno sastavljena.	Rastavite je i očistite. Nakon sušenja, sastavite je prema uputama iz korisničkog priručnika.
Snaga usisa je smanjena.	Filter za zrak se istrošio.	Zamijenite filter za zrak prema uputama iz odjeljka korisničkog priručnika "Održavanje i čuvanje".
Tekućina ili sluz je ušla u cijev.	Niste držali Colibri glavu u ispravnom položaju. Mjesto spajanja cijevi nije usmjereno prema dolje.	Isključite uređaj, te očistite i osušite Colibri glavu i cijev. Provjerite filter za zrak i zamijenite ga ako je potrebno.
Tekućina ili sluz je ušla u cijev.	Koristili ste previše fiziološke otopine.	Smanjite količinu fiziološke otopine na manje od 5 ml. Isključite uređaj i očistite ga, a zatim osušite Colibri glavu i cijev. Provjerite filter za zrak i zamijenite ga ako je potrebno.

Ako uređaj ne radi ispravno unatoč pridržavanju uputa iz vodiča za otklanjanje nepravilnosti u radu, provjerite Vodič za upravljanje kvarovima s isporučiteljem/trgovcem.

Vodič za upravljanje kvarovima

*Jamstvo vrijedi 24 mjeseca od datuma kupnje. Jamstvo će vrijediti samo ako je uređaj korišten u skladu s predviđenom namjenom i nema znakove oštećenja. U sljedećem koraku treba utvrditi postojanje nepravilnosti. Te da li je nepravilnost u radu nastala zbog krivnje korisnika ili nije bila njegova krivnja. Proizvođač daje 24-mjesečno jamstvo u slučaju korištenja uređaja u skladu s predviđenom namjenom. Sljedeće provjere može obaviti bilo koji korisnik kod kuće ili trgovac isporučitelj ili njegov ovlašten zastupnik nakon predočenja popunjenog jamstvenog lista ili računa. Isporučitelj ili pravna osoba zadužena za ocjenu neispravnosti dužna je popuniti jamstveni list isporučen s korisničkim priručnikom ili dati svoj jamstveni dokument, detaljno zabilježiti korake u otklanjanja nepravilnosti u radu i proslijediti ga proizvođaču u roku od 24 sata.*

## Otklanjanje nepravilnosti u radu

### Vizualni pregled

Cjelovita naljepnica na dnu uređaja.

Znakovi oštećenja na naljepnici ukazuju na otvaranje kućišta uređaja.

Zbog pogrešne uporabe uređaja, jamstvo ne vrijedi.

Drugi znakovi oštećenja na kućištu, ogrebotine, udubljenja, ispućenja, deformacije, ogrebotine oko vijaka.

Znakovi oštećenja na kućištu uređaja ukazuju na otvaranje kućišta uređaja.

Zbog pogrešne uporabe uređaja, jamstvo ne vrijedi.

Tragovi onečišćenja na ili oko filtra za zrak. Oštećenje otvora iza filtra za zrak, pijesak u uređaju ili tragovi koji ukazuju na to da je u uređaj ušao pijesak.

Prekomjerno onečišćenje filtra za zrak, te prljavština koja je ušla u uređaj, ukazuju da uređaj nije pravilno korišten.

Zbog pogrešne uporabe uređaja, jamstvo ne vrijedi.

Bilo kakvo onečišćenje cijevi.

Onečišćenje koje je ušlo u cijev ukazuje na pogrešno korištenje uređaja.

Zbog pogrešne uporabe uređaja, jamstvo ne vrijedi.

### Ručni pregled

Prije korištenja uređaja provjerite je li kabel za napajanje priključen na uređaj.

Ako se priključak (ne kabel za napajanje) na uređaju uvukao, može se pomaknuti, može se ukloniti, uključivanje i korištenje uređaja opasno je po život! Takve nepravilnosti su posljedica vanjskih utjecaja i nisu pokrивene jamstvom.

Zbog pogrešne uporabe uređaja, jamstvo ne vrijedi.

Bilo kakva nepravilnost na kontrolnom gumbu.

Ako je kontrolni gumb na vrhu uređaja oštećen, zaglavljen, slobodno se pomiče ili je otpao, nepravilnost je uzrokovana vanjskim utjecajima i nije pokrivena jamstvom. Uključivanje i korištenje uređaja je opasno po život!

Zbog pogrešne uporabe uređaja, jamstvo ne vrijedi.

### Pokretanje/uključivanje

Uključivanje uređaja moguće je s kabelom za napajanje isporučenim s uređajem.

Ako uređaj ne počne raditi u tim uvjetima, predlaže se zamjena kabela za napajanje. Takve nepravilnosti su posljedica vanjskih utjecaja i nisu pokrivena jamstvom.

Zbog pogrešne uporabe uređaja, jamstvo ne vrijedi.

Uključivanje uređaja je moguće, ali nakon uključivanja uređaja javljaju se nepravilnosti.

Ako se jave "neobični" problemi dok koristite uređaj, npr. slaba usisna snaga, ispuštanje dima, jak miris, uređaj zuji ili se neobičajeno glasno čuje, tres se, gasi se, ne može se podesiti pomoću kontrolnog gumba ili se ne isključuje nakon 15 minuta.

**Ako se tijekom rada uređaja jave "neobični" problemi, a na uređaju nema tragova fizičkog oštećenja sadržanih u prve dvije točke, kupac uređaja ima pravo na jamstvo.**

## Zadaci jamstva

Isporučitelj uređaja Nosiboo Pro dužan je što prije obraditi pritužbe kupca na temelju aspekata uključenih u poglavlja korisničkog priručnika Vodič za otklanjanje nepravilnosti u radu i Vodič za upravljanje kvarovima. Isporučitelj uređaja dužan je voditi pisani zapisnik o rješavanju problema. To se može napraviti u okviru interne dokumentacije isporučitelja ili jamstvenog lista koji je isporučen s korisničkim priručnikom. Mora sadržavati uočenu nepravilnost, datum i jedinstveni serijski broj koji se nalazi na naljepnici na dnu uređaja.

### Kontaktni podaci ovlaštenog servisa

Attract Kft.  
H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1. - Mađarska  
Tel.: +36 72 551 642 (pon-pet: 8:00 - 16:00)  
E-mail: customerservice@nosiboo.com

## 6. Održavanje i čuvanje

Kabel za napajanje treba iskopčati iz utičnice i iz uređaja tek nakon što je proces hlađenja završio! Odspojite cijev od uređaja i Colibri glave. Iza priključne jedinice nalazi se filtar za zrak koji sprječava ulazak krutih predmeta i prašine u uređaj. U slučaju neočekivanog pada očinka uređaja, preporučuje se provjera filtra za zrak. Ako je filtar za zrak prljav ili začepljen, zamijenite ga rezervnim. (Popis rezervnih dijelova nalazi se u ođjeljku "Dodaci, rezervni dijelovi".)

### **Slika 1 - Zamjena filtra za zrak**

Očistite kućište suhom, mekom krpom; ne koristite nikakve deterđente ili kemikalije!

Držite uređaj u zatvorenom prostoru gdje je zaštićen od prašine i oštećenja (npr. u ormariću).

Ako imate više djece, preporučujemo da za svako dijete koristite drugu Colibri glavu i da ih kod čuvanja držite odvojeno.

Ne držite uređaj u blizini izvora topline!

## 7. Čišćenje

1. Skinite cijev i nastavak za nos, a zatim rastavite kućište Colibri glave.
2. Operite cjevčicu s ovrtnikom, nastavak za nos i kućište Colibri glave mlakom vodom i deterđentom za pranje suđa i pustite da se osuše.

### **Slika 4 – Čišćenje Colibri glave**

3. Očistite kućište uređaja suhom, mekom krpom; ne koristite nikakve tekućine, deterđente ili kemikalije.
4. Po potrebi obrišite cijev krpom. Nemojte prati cijev.

## 8. Važne informacije o smanjenju elektromagnetskih smetnji

Oprema za kućnu bežičnu mrežu, mobilni telefoni i bežični telefoni mogu utjecati na rad medicinske opreme jer se između uređaja mogu pojaviti elektromagnetske smetnje. Elektromagnetske smetnje mogu uzrokovati neželjeno ometanje rada medicinskih uređaja, te stoga može doći do hitnih situacija.

Zbog prethodno navedenih razloga, medicinski uređaji ne smiju ometati rad bilo koje druge opreme.

Kako bi se zajamčila elektromagnetska kompatibilnost, potrebni zahtjevi utvrđeni su standardima. Standardi definiraju razinu zaštite medicinskog uređaja i maksimalnu vrijednost elektromagnetskog zračenja koju uređaji emitiraju.

Aspirator za nos Nosiboo Pro udovoljava zahtjevima norme EN 60601-1-2:2007. Unatoč tome, tijekom korištenja uređaja trebate slijediti sljedeće upute:

- \* Ne koristite mobilni ili bežični telefon ili bilo koji drugi uređaj koji emitira jaka elektromagnetska zračenja u blizini uređaja! U suprotnom može doći do nepravilnosti u radu uređaja što može uzrokovati hitne situacije.
- \* Preporučuje se držanje uređaja na minimalnoj međusobnoj udaljenosti od 5 m! Provjerite radi li uređaj ispravno ako je ta udaljenost manja!

## 9. Okoliš

Ne odlažite uređaj na kraju isteka vijeka trajanja s kućnim otpadom jer se elektronički uređaji kvalificiraju kao opasni otpad. To je naznačeno sljedećim znakom na pakiranju proizvoda:



Colibri glava ne predstavlja ozbiljnu opasnost za okoliš i može se odložiti kao kućni otpad.

## 10. Specifikacije

Podesiva snaga motora: 200-390 W  
 Diferencijalni tlak: 0,04–0,08 bar  
 Maks. protok zraka: 54 l/min  
 Napajanje: 230 V, 50-60 Hz  
 IP klasa: IP21  
 Klasa zaštite: II  
 Tip primijenjenih dijelova: BF  
 Primijenjeni dijelovi: kompletno kućište  
 Način rada: bez kontinuiranog rada  
 Trajanje rada: 15 min/oko 50 min prekida u radu  
 Trajanje kontinuirane uporabe: maks. 15 min.  
 Temperatura okidanja toplinskog prekidača: 95 °C

Prosječna temperatura kućišta: 30-35 °C nakon 1 min kontinuiranog rada  
 Razina buke: max. 70 dB  
 Raspon temperature: -10 °C... +40 °C  
 Relativna vlažnost: maks. 75%  
 Očekivani vijek trajanja kućišta (električnih dijelova): 3 godine  
 Očekivani vijek trajanja Colibri glave: 3 mjeseca  
 Promjer nosnog umetka Colibri glave: min. 5,6 mm  
 Duljina nosnog umetka Colibri glave: min. 32 mm  
 Masa (kućište): 972 g  
 Dimenzije (kućište, Š x V x D): 200 x 155 x 175 mm  
 Dimenzije (kompletan paket): 180 x 180 x 225 mm

## 11. Dodaci, rezervni dijelovi

### Nosiboo Pro Accessory Set:

Paket dodataka koji se sastoji od rezervnih dijelova Nosiboo Pro  
<https://shop.nosiboo.eu/>



ACS-01-01 plava

- \* 1 Colibri glava
- \* 2 nastavka za nos
- \* 1 cijev
- \* 1 filtar za zrak
- \* 1 četka za čišćenje



ACS-01-02 roze

- \* 1 Colibri glava
- \* 2 nastavka za nos
- \* 1 cijev
- \* 1 filtar za zrak
- \* 1 četka za čišćenje



ACS-01-03 zelena

- \* 1 Colibri glava
- \* 2 nastavka za nos
- \* 1 cijev
- \* 1 filtar za zrak
- \* 1 četka za čišćenje

### Dijelovi se mogu naručiti u ovlaštenom servisu:

Attract Kft. H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1. - Mađarska Tel.: +36 72 551 642 (pon-pet: 8:00 - 16:00)

**E-mail: [customerservice@nosiboo.com](mailto:customerservice@nosiboo.com)**



Kabel za napajanje EU  
NO-01-022-A6-0WE1



Kabel za napajanje UK  
NO-01-022-A6-0WM3



Priključna jedinica  
NO-01-050-H2-7BXX \* plava  
NO-01-050-H2-7PXX \* roze  
NO-01-050-H2-7GXX \* zelena

# Međunarodni jamstveni list

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca od datuma kupnje. Jamstvo će vrijediti samo ako je uređaj korišten u skladu s predviđenom namjenom i nema znakove oštećenja. Valjanost jamstva potvrđuje se kod ovlaštenog isporučitelja uređaja. (Potrebno je predložiti autentičan račun isporučitelja. Isporučitelj uređaja Nosiboo Pro dužan je što prije obraditi pritužbe kupca na temelju aspekata uključenih u poglavlja korisničkog priručnika Vodič za otklanjanje nepravilnosti u radu i Vodič za upravljanje kvarovima. Isporučitelj uređaja dužan je voditi pisani zapisnik o rješavanju problema. To se može napraviti u okviru interne dokumentacije isporučitelja ili jamstvenog lista koji je isporučen s korisničkim priručnikom. Mora sadržavati uočenu nepravilnost, datum i jedinstveni serijski broj koji se nalazi na naljepnici na dnu uređaja.

## Ispunjava isporučitelj

Ime i adresa isporučitelja:

Serijski broj aspiratora za nos Nosiboo Pro:  
(nalazi se na dnu uređaja, na naljepnici)

Datum kupnje:

Vrsta kvara:

Datum kvara:

Supotpis isporučitelja:  
(datum, potpis i pečat)

## Ispunjava ovlašteni servis

Datum primitka:

Servisirani dijelovi:

Novi serijski broj:

Datum povratka:

Supotpis i pečat servisa:

Jamstveni rok zamijenjenih dijelova je 24 mjeseca.

## Ispunjava isporučitelj

Ime i adresa isporučitelja:

Serijski broj aspiratora za nos Nosiboo Pro:  
(nalazi se na dnu uređaja, na naljepnici)

Datum kupnje:

Vrsta kvara:

Datum kvara:

Supotpis isporučitelja:  
(datum, potpis i pečat)

## Ispunjava ovlašteni servis

Datum primitka:

Servisirani dijelovi:

Novi serijski broj:

Datum povratka:

Supotpis i pečat servisa:

Jamstveni rok zamijenjenih dijelova je 24 mjeseca.

*Izričito jamstvo ne utječe na implicitna jamstvena prava kupca!*

**Nosiboo Pro je higijenski medicinski uređaj. Možete koristiti svoje pravo na odustajanje samo ako je uređaj neoštećen i ako je zaštitna folija na nastavku za nos netaknuta. Zbog higijenskih razloga ne zamijenujemo uređaj ako je pakiranje otvoreno.** Smjernice i primjenjivi propisi: Direktiva 2011/83/EU § 16 (e) Europskog parlamenta i Komisije, Republika Austrija: FAGG: § 18 (1) 5, Mađarska: 45/2014. (II. 26.) Vladina uredba § 29 (1) (e).

**Proizvođač i ovlašteni servisni centar:** Attract Kft. H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1. Tel: +36 72 551 642 (pon-pet: 8:00 – 16:00)

**E-mail:** [customerservice@nosiboo.com](mailto:customerservice@nosiboo.com)

nosiboo<sup>\*</sup>pro  
electric nasal aspirator  
[www.nosiboo.eu](http://www.nosiboo.eu)